


PIRUVA Piruvat

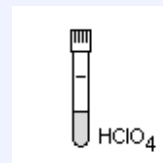

Secció:	Bioquímica
Mètode:	Espectrometria
Tipus mostra:	Altres
Quantitat mostra:	1.5 mL
Contenedor:	MOSTRES ESPECIALS FRED
Termini de lliurament:	17 dies
Motius rebuig:	Adjuntar dades clíniques Extracció en fred
Observacions:	Evitar l'estasi venosa en l'extracció (inferior a 30 segons). Desproteïtzació: Mesclar 1,5 mL d'àcid perclòric al 8% (mantingut a 4 ^o C) amb 1,5 mL de Sang sense anticoagulant. Mesclar invertint el tub varies vegades. Deixar en repòs 5 m